



2292

memeThol®

SK

NÁVOD NA POUŽITIE – memeThol Bariérový sprej

Poznámka

Pred použitím tohto prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie.

Zložky

(1R,2S,5R)-2-izopropyl-5-metylcyklohexanol, hydrogenuhlíčan sodný, 7-(dimethylamino)fenotiazin-3-ylidene]-dimetylamínium; chlorid, 1,2-propanediol, destilovaná voda.

Účel použitia

memeThol Bariérový sprej znižuje a odstraňuje problémy pacientov, ktorí trpia hemoroidmi a ťažkosťami v oblasti konečníka (análne trhliny).

Pre koho je určený

Prípravok môžu používať dospelí pacienti s análnymi trhlinami a problémami s hemoroidmi. Prípravok nesmú používať tehotné a dojčiacie ženy, ako aj deti mladšie ako 15 rokov.

Indikácie

- Prípravok uvoľňuje nefarmakologickým spôsobom bolesť a svrbenie ako najvýraznejšie symptómy hemoroidov, nie je to liek.
- Prípravok vytvára mechanickú bariéru na vonkajšej vrstve pokožky, a tak chráni podráždenú análnu oblasť proti mikrobiálnym účinkom.
- Prípravok vytvorí jemnú vrstvu a zostáva v epiderme.
- Počas používania sa hemoroidy každým dňom znižujú až do ich vymiznutia.
- Prípravok zabezpečuje vhodné pH v análnej oblasti.
- Používaním prípravku sa trhlina a bolesť pacientov trpiacich hemoroidmi znižujú, svrbenie a hygienické problémy miznú a kvalita každodenného života sa zlepšuje.

Kontraindikácie

- Len pre pacientov, ktorým boli diagnostikované hemoroidy.
- Pacienti s rektálnym prolapsom, prípadne análnymi kŕčovými žilami by tento prípravok nemali používať.
- Len pre zníženie bolesti spôsobenej hemoroidmi. Bolesť pacientov s anorektálnymi vredmi môžu pretrvávajúť.
- Prípravok nesmú používať tehotné a dojčiacie ženy, ani deti mladšie ako 15 rokov.
- Prípravok nesmú používať osoby, ktoré sú alergické na ktorúkoľvek zložku prípravku.

Použitie

- 1) Pred použitím očistite a vysušte análnu oblasť.
- 2) Prípravok vyberte z krabice a potraste.
- 3) Zaujmite polohu, ktorá je vhodná pre naniesenie prípravku na oblasť postihnutú hemoroidmi.
- 4) Otočte aplikátor prípravku smerom nahor a nastriekajte na hemoroidy 7-8 krát. Dbajte na to, aby nedošlo ku zasiahnutiu genitálnej oblasti.
- 5) Po aplikácii prípravku počkajte 1-2 minúty v sediacej polohe.
- 6) Po 1-2 minútach si môžete obliecť spodné prádlo.
- 7) Ak si obliečete spodné prádlo ihneď po aplikácii prípravku, môže dôjsť k jeho zafarbeniu do modra.
- 8) Po aplikácii prípravku si dôkladne umyte ruky a znečistené miesta.
- 9) Prípravok používajte 1-krát denne podľa návodu bez prerušenia až do minúta prípravku.

Dávkovanie

- Prípravok používajte 1-krát denne.
- Aj keď bolesti ustúpia pred použitím prípravku, pokračujte s každodennou aplikáciou na postihnutú oblasť až do minúta prípravku.
- Ak po minúty prvého balenia prípravku nedôjde k zlepšeniu stavu hemoroidov na požadovanú úroveň, odporúčame nepretržité pokračovanie liečby druhým balením prípravku. (Vo vážnych prípadoch odporúčame používanie priamo

dvoch balení prípravku, hlavne v prípade tretieho a štvrtého stupňa hemoroidov).

Upozornenia pri manipulácii

- Pred každým použitím prípravok potraсте.
- Používajte podľa návodu na použitie a v odporúčanom množstve bez prerušenia každý deň až do minútia prípravku.
- Na análnu oblasť nenanášajte iný prípravok.

Bezpečnostné opatrenia

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Počas aplikácie prípravku nepite a nejedzte.
- Neaplikujte prípravok do úst, nosa a na iné miesta okrem hemoroidov.
- V prípade znečistenia rúk, očí a úst, ihneď vypláchnite dostatočným množstvom vody.
- Neznečisťujte prípravkom svoje oblečenie a iné veci osobného použitia.

Nesprávny postup pri používaní a následky nesprávneho používania prípravku

- Kontaminácia úst, nosa a očí môže spôsobiť pocit pálenia. Ihneď vypláchnite dostatočným množstvom vody.
- Nedodržanie návodu na použitie alebo nadmerné použitie môže spôsobiť svrbenie, pálenie alebo podráždenie pokožky.
- Prípravok uchovávajte pri izbovej teplote.

NEDÁVAJTE DO CHLADNIČKY, PRÍPRAVKO SA MÔŽE ZNEHODNOTIŤ.

Ako postupovať pri prvom použití

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. Dbajte na varovania pred a počas použitia prípravku. Prestaňte prípravok používať v prípade výskytu alergie.

Podmienky uchovávania

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu a teplu.
- Odporúčaná teplota uchovávania je 15 - 25°C.
- Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Neuchovávajte v chladničke. Chráňte pred mrazom.
- Nepoužívajte po uplynutí dátumu spotreby uvedeného na obale.

Zásady, ktoré treba dodržiavať pre trvalé zlepšenie

- Nejedzte štiplavé a korenisté jedlá.
- Nepite alkoholické nápoje.
- Stolicu pri vyprázdňovaní nevytláčajte na silu.
- Pite dostatočné množstvo vody pre ľahké vyprázdňovanie.
- Vyhýbajte sa jedlám, ktoré spôsobujú zápchu.
- Každý deň zjedzte jedno kiwi pre uľahčenie vyprázdňovania.
- Jedzte celozrnný chlieb namiesto bieleho pečiva.

Vedľajšie účinky

U prípravku nie sú známe nijaké vedľajšie účinky. memeThol Bariérový sprej neobsahuje žiadne kortikoidy a deriváty hormónov. Štúdie potvrdili, že prípravok nemá škodlivé účinky na pokožku.

**almediko**

Výrobca

Almediko Sağlık Ürünleri Turizm
Gıda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi, Mimar Sinan Mahallesi
1420 Sokak č.: 108/203,
Konak/Izmir, Turecko

Distribútor v SR

**Medical Solutions Slovakia,
s.r.o.**, Bellova 2K, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Tento návod na použitie bol pripravený v zmysle EN ISO 62366:2008 a platí od 01.07.2016.